




# VISOCALL IP. Pacienta pults BT-B.

**Lietotāja rokasgrāmata.**

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

## Pacienta pults BT-B.

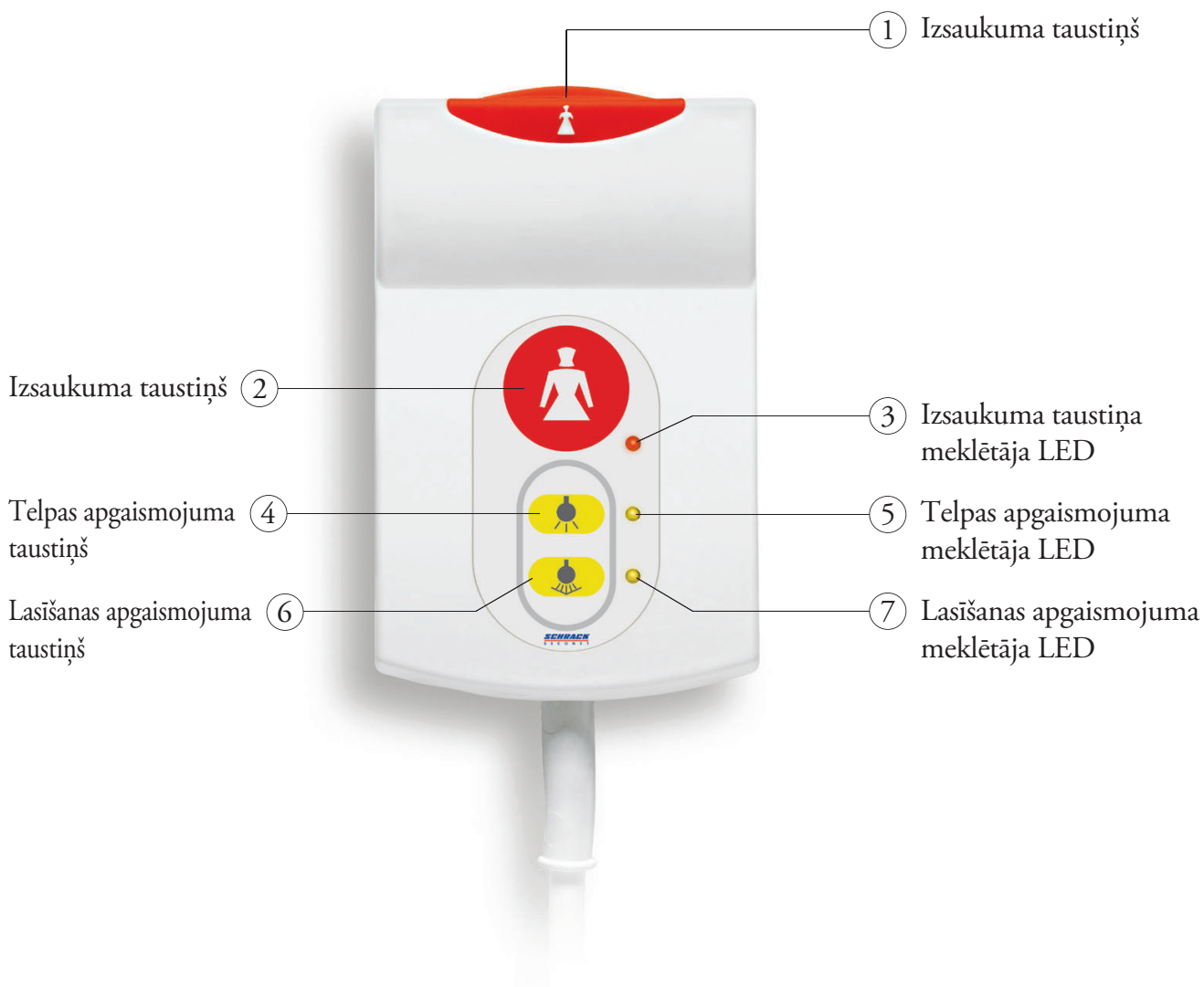

**BRĪDINĀJUMS:** Katru reizi pēc ierīces kontaktdakšas iespraušanas kontaktlīzdā jāpārbauda, vai ierīce darbojas bez jebkādiem traucējumiem un ir iestatīts atslēgšanās signāls. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atslēgšanās signāls automātiski nostrādā katru reizi, kad ierīce ir atvienota no elektroapgādes tīkla.

## Visaugstākā drošība un mūsdienīgs komforta līmenis



Sakaru sistēma, kurai Jūs piekļūstat ar šo ierīci, ir izcili droša, jo tajā izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas.

Tai uzticas pasaulē vislabākās slimnīcas un aprūpes iestādes.

Slimnīcas sakaru ierīcēm ir vārds – **SCHRACK SECONET**.

### Medmāsas izsaukums



Lai izsauktu medmāsu:

- Nospiediet izsaukuma taustiņu (1) vai (2)  
- Izgaismojas izsaukuma taustiņa (1) un izsaukuma taustiņa meklētāja (3)

Pie jums ierodas medmāsa.


### Meklētāja LED/apstiprinājuma LED

LED (1, 3, 5 un 7) deg pastāvīgi, tāpēc taustiņus ir vieglāk atrast pat tumsā.


Ja tiek nospiests izsaukuma taustiņš (1)  vai arī izsaukuma taustiņš (2)  iedegas LED (1) un (3).

### Ieslēgt/izslēgt gaismu

Telpas apgaismojums (pēc izvēles):

- Īsi nospieš telpas apgaismojuma taustiņu (4) 
- Telpas apgaismojums tiek ieslēgts/izslēgts

Lasīšanas apgaismojums (pēc izvēles):

- Īsi nospieš lasīšanas apgaismojuma taustiņu (6) 
- Lasīšanas apgaismojums ir ieslēgts/izslēgts

### Tīrīšana un dezinfekcija

Pacienta rokas ierīces BT-B tīrīšanai un dezinfekcijai drīkst izmantot tikai tādus dezinfekcijas līdzekļus, kas ne daļēji, ne pilnībā nesatur ne ketonus, nedz esterus.

Dezinfekcija jāveic, ierīci noslaukot, un aizliegts to iegremdēt dezinfekcijas līdzeklī.

Ja pastāv iespēja, ka brāķa izstrādājumi ir infē cēti, tie jānotīra un jādezinficē, pirms tos nosūta atpakaļ remontam saskaņā ar šo paziņojumu.



## SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnergasse 18  
A-1120 Vienna  
Tel. +43 1 81157  
[office@schrack-seconet.com](mailto:office@schrack-seconet.com)  
[www.schrack-seconet.com](http://www.schrack-seconet.com)

LV

Czech Rep. • CZ-149 00 Prague 4 - Újezd., Štítová 283 • Tel. +420 2 74784422  
Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel. +36 1 4644300  
India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel. +91 124 4141501  
Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinum V • Tel. +48 22 3300620  
Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A et. 1, Sector 2 • Tel. +40 372 756316  
Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel. +7 495 5105015  
Slovakia • SK-83527 Bratislava–Rača, Mudrochova 2 • Tel. +421 2 44635595  
Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel. +46 8 6801860  
Turkey • TR-34722 Kadıköy-İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel. +90 216 3455199

**HEALTH CARE**

**SCHRACK**  
SECONET