




# VISOCALL IP. Pacienta rokas ierīce PAT.

**Lietotāja rokasgrāmata.**

HEALTH CARE

**SCHRACK**  
S E C O N E T

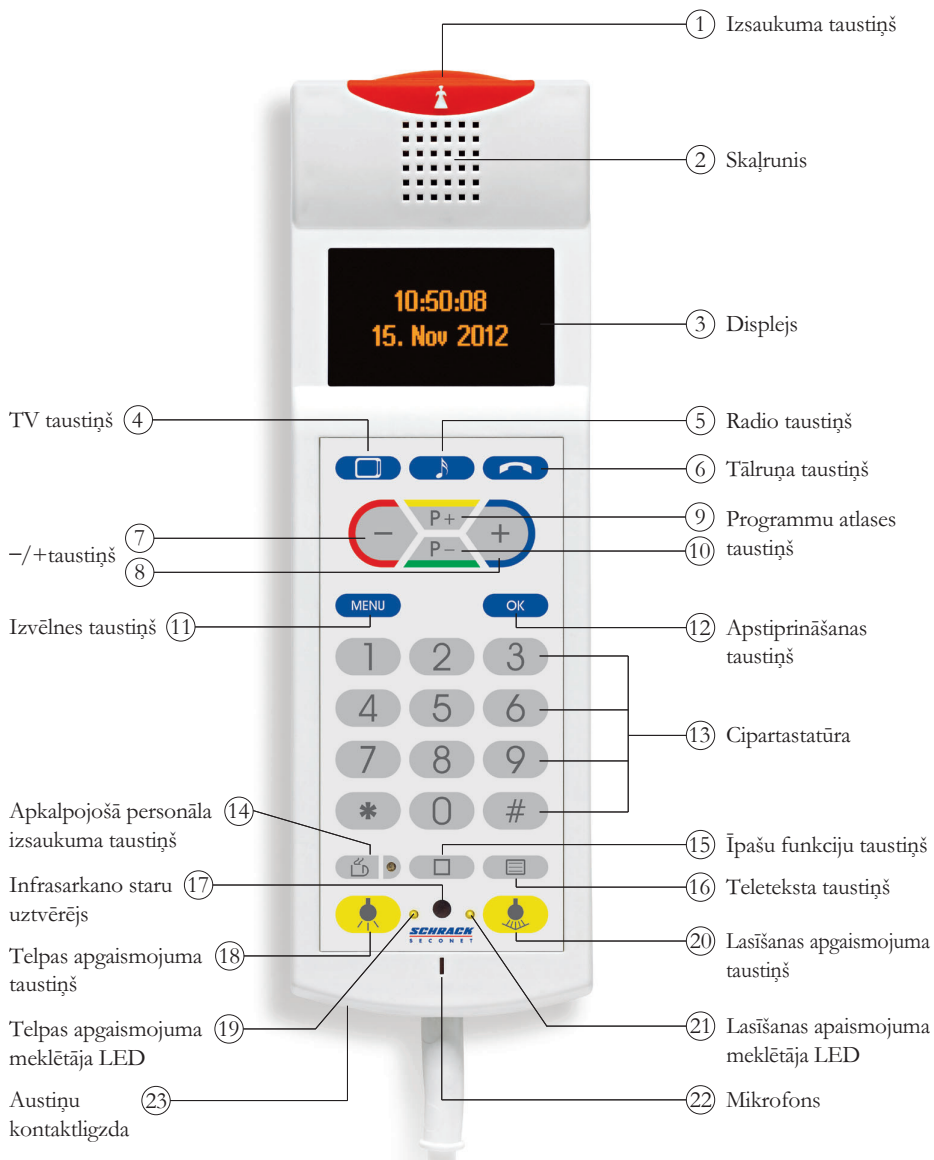

# Pacienta rokas ierīce ar telefonijas funkcijām.




**BRĪDINĀJUMS:** Katru reizi pēc ierīces kontaktdakšas iespraušanas kontaktligzdā jāpārbauda, vai ierīce darbojas bez traucējumiem un ir iestatīts atslēgšanās signāls. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atslēgšanās signāls automātiski nostrādā katru reizi, kad ierīce ir atvienota no elektroapgādes tīkla.

## Medmāsas izsaukums

### Lai izsauktu medmāsu:

- Nospiediet izsaukuma taustiņu (1) 
- Izsaukuma taustiņš (1) izgaismojas 

### Medmāsa atbild:

- Skaļruni (2) atskan gonga signāls
- Mīrgo izsaukuma taustiņš (1) 
- Runājiet ar medmāsu, izmantojot skaļruni (2) un mikrofonu (22) (tāpat kā, piemēram, zvanot pa tālruni)
- Sarunu beidz medmāsa

## Meklētāja LED/apstiprinājuma LED


LED (1, 14, 19 un 21) deg pastāvīgi, tādējādi taustiņus ir vieglāk atrast pat tumsā.

Ja tiek nospiests izsaukuma

taustiņš (1) ,

iedegas integrētā LED (1). 


## Apkalpojošā personāla izsaukums

- Nospiediet izsaukuma taustiņu (14) 
- Blakus apkalpojošā personāla izsaukuma taustiņam iedegas LED


Apkalpojošais personāls sazinās ar jums, vai nu izmantojot skaļruni (2), vai arī ierodoties pie jums.

## Radio

### Lai ieslēgtu radio:

- Nospiediet radio taustiņu (5) 
- Uz displeja (3) būs redzama pēdējā ieslēgtā radio programma

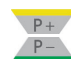

### Izvēlēties programmu:

- Atlasiet programmu, izmantojot programmas taustiņus (9) vai (10) 
- Atlasītā programma parādās uz displeja (3)

### Radio skaņa:

- Dzirdama ar skaļruni (2) vai arī ar austiņām (savienojuma kontaktligzda 23)

### Skaļums:

- Izmantojiet – taustiņu (7), lai samazinātu skaļumu 
- Izmantojiet + taustiņu (8), lai palielinātu skaļumu 

### Lai izslēgtu radio:


- Atkal nospiediet radio taustiņu (5) 

## Ieslēgt/izslēgt apgaismojumu

### Telpas apgaismojums (pēc izvēles):


- Īsi nospiediet telpas apgaismojuma taustiņu (18) 
- Telpas apgaismojums tiek ieslēgts/izslēgts

### Lasišanas apgaismojums (pēc izvēles):

- Īsi nospiediet lasišanas apgaismojuma taustiņu (20) 
- Lasišanas apgaismojums tiek ieslēgts/izslēgts

## Televīzija (pēc izvēles)

### Lai ieslēgtu televizoru:

- Nospiediet TV taustiņu (4) 
- Televizors ir ieslēgts
- Uz displeja (3) tiek parādīts pēdējais kanāls, ko esat skatījis

### Izvēlēties programmu:



- Tieši, izmantojot cipartastatūru (13), vai izmantojot programmu atlasē taustiņus (9) vai (10)





### TV skaņa:

- Pa skaļruni (2) vai arī austiņās (savienojuma kontaktligzda 23)
- Pēc izvēles izmantojot TV ierīces skaļruni





### Skaļums:

- Izmantojiet – taustiņu (7), lai samazinātu skaļumu 
- Izmantojiet + taustiņu (8), lai palielinātu skaļumu 

### Teleteksts ieslēgts/izslēgts:

- Nospiediet teleteksta taustiņu (16) 
- Izvēlieties lapu, izmantojot cipartastatūru (13)
- Lai izietu no teleteksta režīma, nospiediet teleteksta taustiņu (16) 

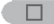

## Žalūziju vadība (pēc izvēles)

- Nospiediet īpašo funkciju taustiņu (15) 
- Uz displeja (3) tiek parādītas īpašās funkcijas
- Atlasiet funkciju „žalūzijas“, izmantojot programmas atlasē taustiņus (9) vai (10)
- Izmantojot –/+ taustiņus (7) un (8)   žalūzijas var atvērt vai aizvērt
- Lai aizvērtu īpašās funkcijas, nospiediet īpašo funkciju taustiņu (15) 






## Zvanīt pa tālruni (pēc izvēles)






### Saņemt zvanu:

- Nebūvētajā zummerī dzirdamas zvana skaņas
- Atbildiet uz zvanu, nospiežot  tālruņa taustiņu (6)
- Sarunai un tās beigšanai nospiediet tālruņa taustiņu (6) 



### Izejošais telefona zvans:

- Nospiediet tālruņa taustiņu (6) 
- Nospiediet sarunas taustiņu (parasti cipars „0“). Ja nepieciešams, palūdziet, lai personāls parāda, kā tas darāms)
- Sastādiat vajadzīgo tālruņa numuru, izmantojot cipartastatūru (13)
- Nospiediet OK taustiņu (12) 
- Sarunai un tās beigšanai no jauna nospiediet tālruņa taustiņu (6) 

### Pēdējā numura atkārtošana:


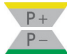



- Nospiediet tālruņa taustiņu (6) 
- Veikt funkcijas vaicājumu ar programmas atlasē taustiņu P- (10) 
- (iespējami beidzami 10 tālruņa numuri)
- Atlasīt nepieciešamo numuru ar programmu atlasē taustiņiem (9) vai (10) 
- Apstipriniet atlasīto ar OK taustiņu (12) 
- Atlasītais tālruņa numurs tiek izsaukts
- Sarunai un tās beigšanai no jauna nospiediet tālruņa taustiņu (6) 

### Skaļums:


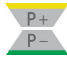



- Izmantojiet – taustiņu (7), lai samazinātu skaļumu 
- Izmantojiet + taustiņu (8), lai palielinātu skaļumu 

## Izvēlnes funkcijas







### Iestatīt displeja spilgtumu:

- Nospiediet izvēlnes taustiņu (11) 
- Atlases izvēlne parādās displejā (3)
- Atlasiet „Spilgtums“ izvēlnes vienumu izmantojot programmu atlasē taustiņus (9) vai (10) 
- Nospiediet OK taustiņu (12) 
- Iestatīt displeja spilgtumu, izmantojot –/+ atslēgas (7) un (8) 
- Vēlreiz nospiediet izvēlnes taustiņu (11) lai aizvērtu izvēlni 


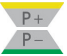

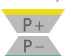
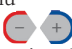

### Iestatīt displeja kontrastu:

- Nospiediet izvēlnes taustiņu (11) 
- Atlases izvēlne parādās displejā (3)
- Izvēlieties „Kontrasts“ izvēlnes vienumu izmantojot programmu atlasē taustiņus (9) vai (10) 
- Nospiediet OK taustiņu (12) 
- Iestatīt displeja kontrastu, izmantojot –/+ taustiņus (7) un (8) 
- Vēlreiz nospiediet izvēlnes taustiņu (11) lai aizvērtu izvēlni 
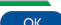
### Iestatīt pamata skaļumu:

- Nospiediet izvēlnes taustiņu (11) 
- Atlases izvēlne parādās displejā (3)
- Izvēlieties „Skaļums“ izvēlnes vienumu izmantojot programmu atlasē taustiņus (9) vai (10) 
- Nospiediet OK taustiņu (12) 
- Atlasītā apakšizvēlne parādās displejā (3)
- Atlasiet apakšizvēlnes vienumus „Runa“, „Paziņojums“, „Teleons“, „Zvana melodija“ vai „Multimēdiji“ izmantojot programmu atlasē taustiņus (9) vai (10) 
- Iestatiet skaļumu, izmantojot –/+ taustiņus (7) un (8) 
- Vēlreiz nospiediet izvēlnes taustiņu (11) divas reizes, lai aizvērtu izvēlni 

### Iestatīt zvana tonis:

- Nospiediet izvēlnes taustiņu (11) 
- Atlases izvēlne parādās displejā (3)
- Izvēlieties „Zvanu toni“ izvēlnes vienumu izmantojot programmu atlasē taustiņus (9) vai (10) 
- Nospiediet OK taustiņu (12) 
- Iestatiet zvana tipu, izmantojot programmu atlasē taustiņus (9) vai (10) 
- Iestatiet zvana signāla skaļumu ar –/+ taustiņiem (7) un (8) 
- Vēlreiz nospiediet izvēlnes taustiņu (11), lai aizvērtu izvēlni 

## Infrasarkanais uztvērējs (pēc zvēles)

Infrasarkanais uztvērējs tiek izmantots, lai saņemtu datus no tā sauktajām vides kontroles ierīcēm.

Izmantojot šīs ierīces, Pacienta rokas ierīce PAT funkcijas iespējams kontrolēt ar infrasarkano staru palīdzību.

## Tīrīšana un dezinfekcija

Pacienta ierīces PAT tīrīšanai un dezinficēšanai drīkst izmantot tikai tādas dezinfekcijas līdzekļus, kas ne daļēji, ne pilnībā nesatur ne ketonus, nedz esterus. Dezinficēšana jāveic, ierīci noslaukot ar dezinfekcijas līdzekli samērcētu lupatu, un aizliegts ierīci iegremdēt dezinfekcijas līdzeklī.

Ja pastāv iespēja, ka brāķa izstrādājumi ir inficēti, tie jānotīra un jādezinficē, pirms tos nosūta atpakaļ remontam saskaņā ar šo paziņojumu.

# Ar šo ierīci jūs varat kontrolēt visu.

## Cienījamais pacient!

Šī universālā ierīce atviegļina jūsu iespējas izmantot pieejamos pakalpojumus, piemēram, izsaukt medmāsu, klausīties radio, skatīties TV, zvanīt pa tālruni, ieslēgt telpas/lasišanas apgaismojumu utt. tieši no jūsu slimnīcas gultas.

## Lūdzu, veltiet laiku, lai iepazītos ar tās svarīgākajām funkcijām!

Šī ierīce palīdz padarīt Jūsu uzturēšanos slimnīcā pēc iespējas ērtāku un daudzveidīgāku!



**Ārkārtas situācijā varat ātri izsaukt palīdzību,  
izmantojot sarkano medmāsas izsaukuma taustiņu!**

Nākamajās lappusēs sniegts sīks ierīces un tās funkciju apraksts. Ja Jums radīsies jautājumi, piemēram, par konkrētām funkcijām, slimnīcas darbinieki ar prieku Jums palīdzēs!

## Visaugstākā drošība un mūsdienīgs komforta līmenis.

Sakaru sistēma, kurai Jūs piekļūstat ar šo ierīci, ir izcili droša, jo tajā izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas.

Tai uzticas pasaulē vislabākās slimnīcas un aprūpes iestādes.

Slimnīcas sakaru ierīcēm ir vārds – **SCHRACK SECONET**.





## SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnergasse 18  
A-1120 Vienna  
Tel. +43 1 81157  
[office@schrack-seconet.com](mailto:office@schrack-seconet.com)  
[www.schrack-seconet.com](http://www.schrack-seconet.com)

LV

Czech Rep. • CZ-149 00 Prague 4 - Újezd., Štítová 283 • Tel. +420 2 74784422  
Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel. +36 1 4644300  
India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel. +91 124 4141501  
Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinum V • Tel. +48 22 3300620  
Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A et. 1, Sector 2 • Tel. +40 372 756316  
Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel. +7 495 5105015  
Slovakia • SK-83527 Bratislava-Rača, Mudrochova 2 • Tel. +421 2 44635595  
Sweden • SE-145 84 Norsborg, Botvid Business Center • Tel. +46 8 6801860  
Turkey • TR-34722 Kadıköy-İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel. +90 216 3455199

**HEALTH CARE**

**SCHRACK**  
SECONET